



### Rengøring – desinfektion af rektaltermometer

Ved brug af samme rektaltermometre til flere borgere gælder:

- Der bruges altid engangsovertræk
- Termometeret afvaskes med vand og sæbe og aftørres
- Herefter desinficeres det grundigt med sprit til overflader (ikke håndsprit) – skal holdes fugtigt af spritten i mindst et minut for at spritten virker optimalt
- Skal tørre af sig selv inden det pakkes sammen

Hvis termometeret benyttes hos en borger hvor man desinficerer med klor (pga. Norovirus eller Clostridium Difficile), skal termometeret altid rengøres med vand og sæbe og herefter aftørres med klorkludene i stedet for med sprit til overflader, skal holdes fugtig af klor i mindst 10 minutter. I de få tilfælde det er relevant, anbefaler jeg, at termometeret bliver hos borgeren, da førnævnte mikroorganismer er yderst smitsomme (især højvirulent Cl. Diff.) og er at finde i afføringen.

Ved borger med kendt MRSA eller andre multiresistente bakterier skal termometeret ligeledes altid både rengøres og desinficeres, og forblive hos borgeren, for at stoppe risiko for smitte til anden borger.

Til almindelig desinfektion benyttes sprit (ethanol) til overflader:



Enkeltpakke med varenummer 150149



Varenummer 150180

Nedenstående desinfektionsklude kan ligeledes benyttes. Derudover sprit til overflader på flaske, som hældes på en klud eller papir.

