



Hygiejne i Hjemmeplejen og på Plejecentre

Udarbejdet af
Hygiejnesygeplejerske
Birgitte Sachmann
Godkendt af
Anette Bach Mogensen
Version 1.0

Instrumentopvaskemaskine

Gældende fra marts 2019
Rev. senest marts 2022

Urene instrumenter håndteres så lidt som muligt, og altid med handsker. Undgå manuel afvaskning forinden. Er der instrumenter med synligt blod eller andet, er det dog nødvendigt forinden at sætte det i blød i vand – uden sæbe, eller forsigtigt børste med en engangstandbørste. Her bruges både engangsforklæde og handsker.

Der benyttes følgende indkodede programmer:

1. Vario TD – til instrumenter
2. Plast TD – til sårkasser og doseringsæsker
3. Skylning (kan benyttes hvis instrumenterne ligger deri mange timer før der køres et program)

Maks to lag i maskinen

Maskinen håndteres fra venstre mod højre.

Opstart: Tænd maskinen – tjek programmet – START

Når programmet er færdig, åbner lågen automatisk lidt, for at få det sidste damp ud, og tørre ca en halv times tid.

Husk IKKE at trykke pinden ind foroven der holder lågen, når lågen står lidt åben.

Filter tømmes hver tirsdag (vigtigt at det sættes godt på plads, hvis hele filteret tages op)

Groft salt og efterskylsmiddel, tilsættes de rigtige beholdere i lågen, når maskinen melder behov for dette.

Ved skift at sæbe - base og syre - de store beholdere, der står under maskinen, benyttes BÅDE nitrilhandsker, briller samt engangsforklæde. Er der en slat tilbage i den gamle beholder, hældes den over i den nye beholder.

Ved yderligere brug for INFO – tjek instruktionsbog for maskinen.

Maskinen skal kontrolleres/serviceres årligt at en Miele tekniker.