



## Tilsligtet anvendelse af instrumentet

En curette er et kirurgisk instrument til at afskrabe eller fjerne væv i forbindelse med sårbehandling. Curetten er ekstremt skarp, hvilket sikrer præcis og skånsom fjernelse af væv. OBS: Curetten er til engangsbrug.

## Betjening af Curetten

Curetten er lavet af en ring i rustfrit stål i den ene ende og et polypropolen-håndtag i den anden. Curetten findes i forskellige størrelser, i Fredericia Kommune har vi størrelserne 3 mm, 5 mm og 7 mm. Ved anvendelse skal den skarpe side være nedad, dette ses ved, at det prægede mærke i håndtaget vender opad.



## Forebyggelse af skæreskader

Hvis der under sårbehandling er brug for at fjerne væv fra Curettens stålring, kan følgende muligheder anvendes:

- Anvend en skylleskål med ca. 1 cm vand, hvori Curettens stålring skylles godt
- Anvend en pincet til at stikke igennem Curettens stålring, for at skubbe væv ud

Skæreskaderne opstår oftest ved brug af gazeserviet til at fjerne væv i stålringen, denne metode KAN IKKE anbefales at anvende.

## Bortskaffelse

Bortskaffes i en kanyleboks