



# Hygiejne i Hjemmeplejen og på Plejecentre

Udarbejdet af sgpl. Anita  
Fahlén og Hyg. Sgpl. Birgitte  
Sachmann  
Godkendt af  
Anette Bach Mogensen  
Version 2.1

## Brug af blærescanner

Gældende fra januar 2024  
Rev. senest januar 2027

### Formål

At forebygge skader på borgernes blæremuskel grundet ekstention forårsaget af urinretention.

At minimere hyppigheden af SIK og deraf antallet af invasive indgreb.

### Indikation

Borgere med symptom på urinretention (manglende vandladning, små hyppige vandladninger, smerter og trykken over symfyen, hyppige UVI, sivende vandladning, nucturi, akut febrilia/konfusion samt på baggrund af anamnese).

Som udgangspunkt anvendes scanneren i akutte situationer, eller når kateter bliver seponeret.

På Hannerup anvendes scanneren ligeledes ved udskrivelse fra sygehuset med SIK ved resturin på mere end 200-300ml.

### Kontraindikation

Gravide, P-dialyse borgere samt børn.

### Krav til personalet

Primært sygeplejersker, samt SSA hvis der foreligger en lokal instruks herpå i det enkelte distrikt.

### Vigtigt

Scannerne virker ikke, hvis de ikke bliver sat til strøm, når de ikke er i brug.

Derfor er det vigtigt at scannerne ikke er ude af strøm i for mange timer. I så fald at scanneren IKKE kan starte (evt. gået tør for strøm), er det vigtigt, at den bliver sat til strøm. Scanneren skal have været under opladning i 6 timer, før den kan nulstilles.

Send altid avis til akutsygeplejen hvis scanneren ikke virker.

Husk at skrive på låneseddel, når I tager den med ud til borgere.

Efter brug skal scanneren både rengøres og desinficeres.

### Rengøring og desinfektion af scanneren

Al synlig snavs/gel fjernes med tørt papir, herefter aftørres scannerhovedet med vand/sæbe universalklud. Er håndtaget synligt forurenet, rengøres det også inden det desinficeres. Scanneren må aldrig nedfældes i vand.



# Hygiejne i Hjemmeplejen og på Plejecentre

Udarbejdet af sgpl. Anita  
Fahlén og Hyg. Sgpl. Birgitte  
Sachmann  
Godkendt af  
Anette Bach Mogensen  
Version 2.1

## Brug af blærescanner

Gældende fra januar 2024  
Rev. senest januar 2027

Scanneren skal være helt tør inden den desinficeres. Herefter aftørres med desinfektionsklud med alkohol 70-85% til overflader. Start med håndtaget og herefter scannerhovedet.

### Fremgangsmåde

- Altid først forsøg om borgeren kan lade vandet af sig selv
- Borgeren lejres fladt på ryggen
- Indstil scanneren til mand eller kvinde (er hun hysterektomeret, scannes hun som mand)
- Der placeres rigeligt (ultralyds) gel over symfysen (eller på scanningshovedet)
- Hold instrumentet stille mens du scanner
- Hold den på huden med rette tryk, hvis der trykkes for hårdt, vises der et > symbol
- Ved overvægtige borgere, skal du løfte så meget fedstvæv væk som muligt
- Obs at der ikke er luftbobler i gelen

Der scannes altid tre gange, og den højeste værdi, er den man går ud fra.

VIGTIGT. Hvis scanning viser over > 999ml, kontaktes lægen/vagtlægen straks, da der er risiko for polyuri

### Litteraturhenviisning

Bladderscan BVI 6100, manual

<https://verathon.com/assets/0900-4830-xx-60.pdf>

Nationale infektionshygiejniske retningslinjer for desinfektion i sundhedssektoren, CEI 1,3 udgave 2018

<https://hygiejne.ssi.dk/-/media/arkiv/subsites/infektionshygiejne/retningslinjer/nir/nir-desinfektion.pdf?la=da>