



Sygeplejefaglig vejledning i Hjemmeplejen og på plejehjem

Udarbejdet
hygiejnesygeplejerske
Christina Niemann
Godkendt af Plejeforfatter Anne
Juul Sørensen

Version 1.0
Reduceret og ændret ift. VAR
sep. 2024

Nebulisator – værd at vide og rengøring

Gældende fra sep 2022
Rev. senest sep 2025

Baggrund

Borgere med lungelidelser (fx astma, kol, cystisk fibrose osv.), der har svært ved at anvende andre former for inhalationsapparater kan med fordel bruge en nebulisator.

En nebulisator er en lille maskine (kompressor), som forstøver medicinen til en slags tåge, så den lettere kan indåndes og kommer helt ned i luftvejene.




Husk/værd at vide :

- Slangen må ikke nedsænkes i vand
- Når maskinen er i brug, skal den ikke stå på gulvet, da der kan komme støv i maskinen
- Nebulisator og slanger samt masker udleveres af Lungemedicinsk Ambulatorium
- Ved **akut behov** for en Nebulisator kan denne fremskaffes fra akutsygeplejen samt flere sygeplejedepoter (som udlån). Masker og slanger til akut brug bestilles via sygeplejedepotet.

Rengøring af masken: Vær opmærksom på hvilken farve maske, der skal rengøres.

SideStream Disposable

Efter hver brug

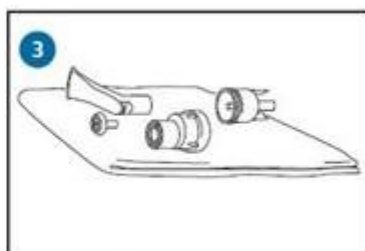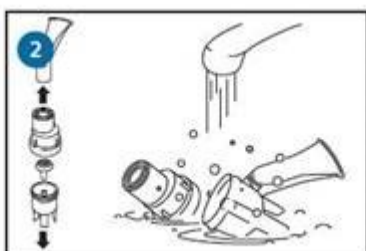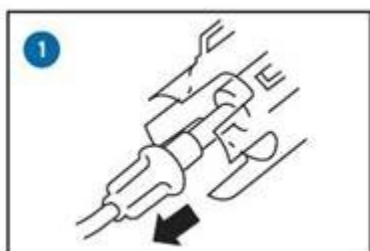

1. Frakobel slangen fra masken
2. Skil og vask alle dele (undtagen slangen) i varmt vand med mildt opvaskemiddel (uden parfume)
3. Skyl dernæst under rindende vand, ryst overskydende vand af og lad delene lufttørre før delene sættes sammen igen.

SideStream Resuable

Efter hver brug





Sygeplejefaglig vejledning i Hjemmeplejen og på plejehjem

Udarbejdet
hygiejnesygeplejerske
Christina Niemann
Godkendt af Plejeforfatter Anne
Juul Sørensen

Version 1.0
Reduceret og ændret ift. VAR
sep. 2024



Nebulisator – værd at vide og rengøring

Gældende fra sep 2022
Rev. senest sep 2025

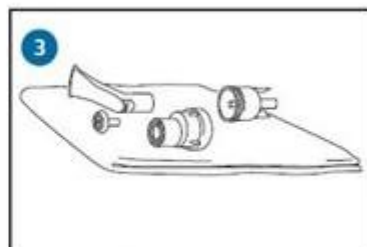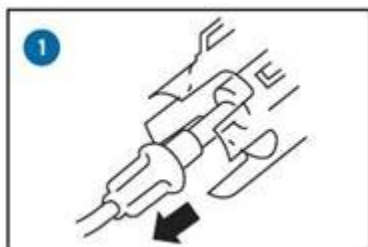

1. Frakobbel slangen fra masken
2. Skil og vask alle dele (undtagen slangen) i varmt vand med mildt opvaskemiddel (uden parfume)
3. Skyl dernæst under rindende vand, ryst overskydende vand af og lad delene lufttørre før delene sættes sammen igen.

En gang ugentlig

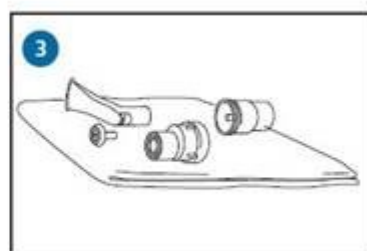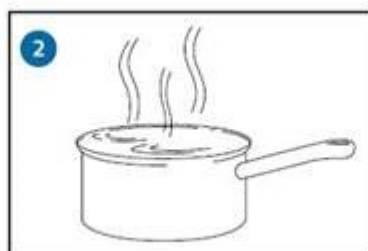

1. Læg alle delene i en gryde med vand og 2-3 dråber mildt opvaskemiddel (uden parfume)
2. Kog i 10 minutter
3. Skyl i rindende vand og lad delene lufttørre før delene sættes sammen igen.

Vedligehold og rengøring af maskine :

Maskine kan aftørres med ren fugtig klud.

Filter skiftes hvis det bliver misfarvet og ellers hver 3. måned ved daglig brug.

Litteraturhenvielse

Rengøringsvejledning fra Philips Professional Healthcare

Medicin.dk :<https://min.medicin.dk/Indledningsafsnit/Afsnit/3827>



Sygeplejefaglig vejledning i Hjemmeplejen og på plejehjem

Udarbejdet
hygiejnesygeplejerske
Christina Niemann
Godkendt af Plejeforfatter Anne
Juul Sørensen

Version 1.0
Reduceret og ændret ift. VAR
sep. 2024

Nebulisator – værd at vide og rengøring

Gældende fra sep 2022
Rev. senest sep 2025

Patientinformation Vejle Sygehus, Rengøring af medicinforstøver, Medicinsk Afdeling 09.03.2017

http://ipaper.ipapercms.dk/RegionSyddanmark/Sygehus_Lillebaelt/Kliniske_Afdelinger/Medicinsk_Vejle/123765/

Patientinformation Horsens, forstøver Nebulizer, brugsanvisning: <https://www.regionshospitalet-horsens.dk/patientinformation/afdeling/medicinsk-afdeling/lungesygdomme/forstover-nebulizer-til-ventoline-eller-saltvand-udlevering-og-rengoring-af/>